

分娩直後～退院までの間、
ママの骨盤を \ キュッ! / と固定


直後ケアベルト




使用方法

仰向けに寝て締めて下さい


2枚入り (S字フック付)
透湿性生地で、ムレにくく安心
汚れたら、新しいベルトに交換

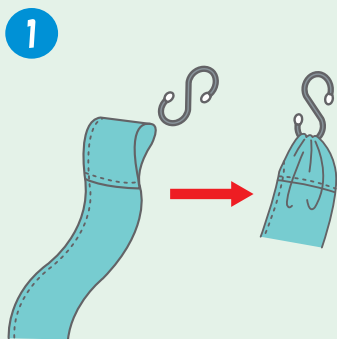


ベルト (緑) の輪 に付属の S字フックを通します。

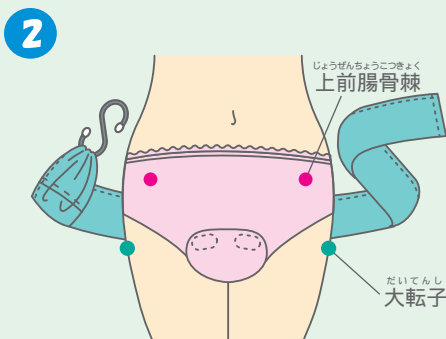



ベルト (緑) をベッドとショーツの間に通しますが、横からではなく、太もも側からお尻をすくいあげるようにします。

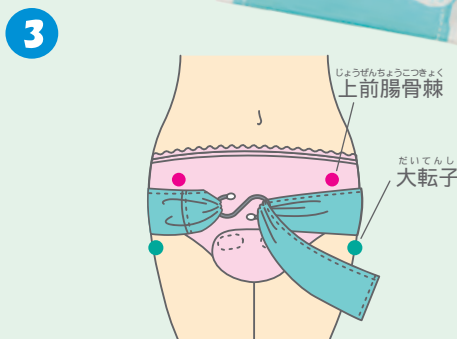


ベルト (緑) の下ラインは「大転子」に一致するように、また、締めたときに S字フックが体の中心にくるようにセットします。
決してベルトが「上前腸骨棘」にかからないよう!

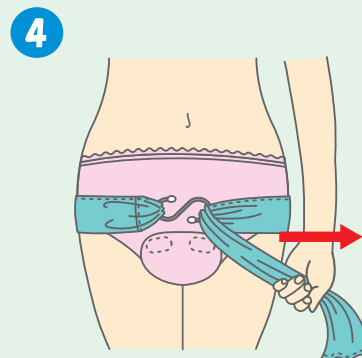


を持ち「骨盤高位」の姿勢で気持ちよい強さになるまで矢印の → 方向に締めます。このとき S字フックが体の中心になるように。

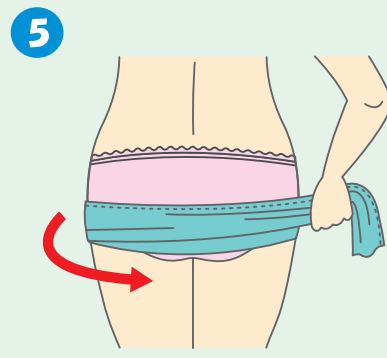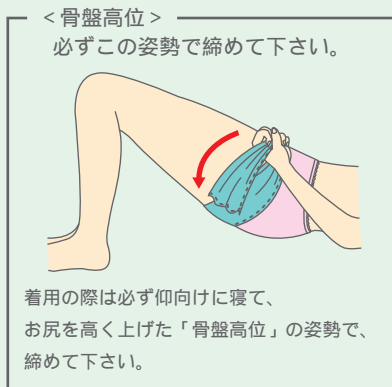

手を持ち替えてベルトをしっかりと締めながら背面に回します。

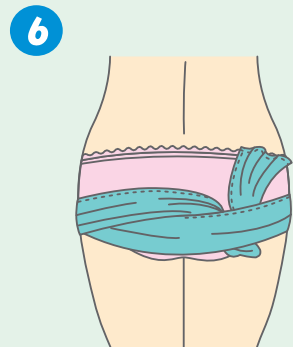

ベルト を締めているベルトとヒップの間にしっかりと挟み込みます。

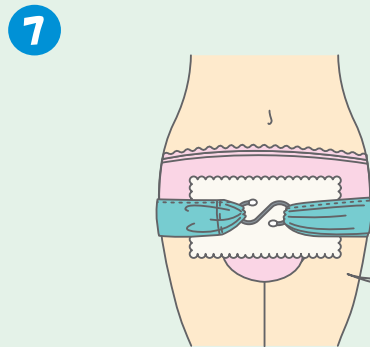

座ったり、立った時に強すぎる場合は、気持ち良い締め心地になるまで少し緩めて下さい。

装着の位置等がわからない場合は助産師にお尋ね下さいネ。

ベルトが食い込んで痛い方は間にタオル等を挟んでご着用下さい。



【品コード】92118

【品名】直後ケアベルト

【JAN】4904820921186

【入り数】100数/ケース (25袋×4ポリ袋)



大衛株式会社

Protector of Beautiful Life

■本社
〒534-0021 大阪市都島区都島本通2-3-3
TEL.06-6924-0495 FAX.06-6925-7498

札幌：011-712-0263
仙台：022-225-2745
千葉：043-234-6157
埼玉：048-653-1113

東京：03-5923-0341
横浜：045-942-9525
名古屋：052-369-4110
学研都市：072-856-6531

大阪：06-6928-7245
神戸：078-739-7470
岡山：086-242-2470
広島：082-211-2166

福岡：092-622-8415
コンシューマ事業本部
：052-355-2711